



【スマートe-SMBG】かんたん連携



iPhone版

Android版

アーケレイのアプリ「スマートe-SMBG」に記録されている測定結果を、かんたんに取得することができます。

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

ご利用いただくためには「スマートe-SMBG」のアカウント設定が必要です。
※設定されていないと記録を正常に取得することができません。


- 「e-SMBGクラウド」の会員登録をされていますか
設定方法は「スマートe-SMBG取扱説明書」70ページをご参照ください。
(Webサイト <https://cloud.e-smbg.net/appli.aspx> で公開されています。)
- 「スマート e-SMBG」に ID とパスワードを設定されていますか
設定方法は「スマートe-SMBG取扱説明書」71ページをご参照ください。
(Webサイト <https://cloud.e-smbg.net/appli.aspx> で公開されています。)

- ◆ アプリの画面はiPhone(iOS版バージョン1.2)で操作した場合の画面です。Android端末の場合でも同じ画面が表示されます。
- ◆ 「スマートe-SMBG」へ手入力したデータの取得はできません。
- ◆ 取得したデータが自動反映されるまでには時間が掛かります。

Step.1 「e-SMBG」の自動同期設定をしましょう

- 「e-SMBG」の操作は  の番号です。
- 「Welbyマイカルテ」の操作、および「e-SMBG」との操作は  の番号です。


- 1 [e-SMBG] の [設定] より [機器連携設定] をタップします。
- 2 [e-SMBGクラウド連携] をタップします。
- 3 [e-SMBG設定] をタップします。

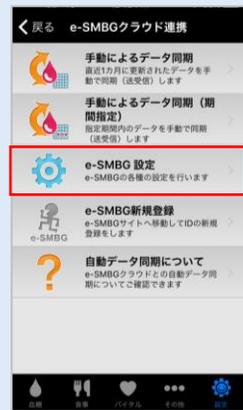

- 4 [e-SMBGクラウド 自動同期] を有効にします。


【iPhone】

[e-SMBGクラウド 自動同期] - [e-SMBGクラウド 自動同期] を [する] にし、[設定] をタップします。
[自動同期について] を確認の上、[OK] をタップします。

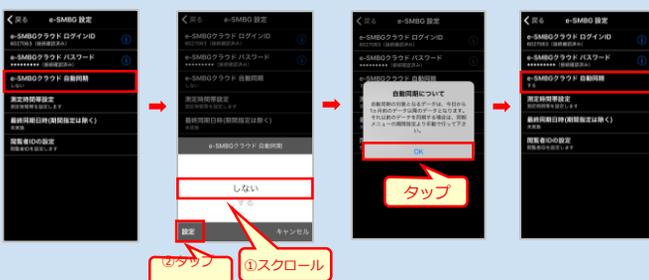

【Android】

[e-SMBGクラウド 自動同期] のチェック ボックスを [ON] にします。

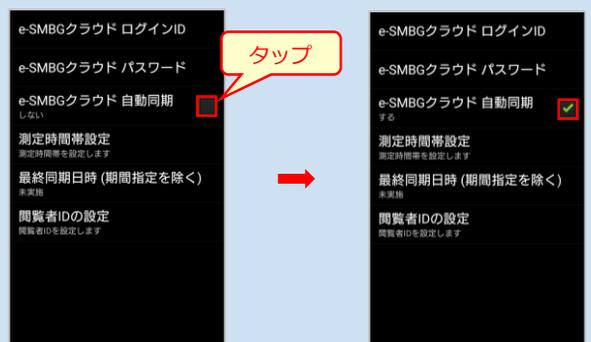

Step.2 「Welbyマイカルテ」に測定結果を連携しましょう

1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [マイページ] をタップし、[機器、サービス連携] をタップします。




2 [e-SMBG (アークレイ)] の [連携登録] をタップします。



3 [機器連携設定] 画面が表示されたら、[アクセスコードを取得する] をタップします。

4 Webブラウザが開いたら、同意の内容を確認します。

5 [e-SMBG ログインID] と [e-SMBG パスワード] を入力し、[同意する] ボタンをタップします。

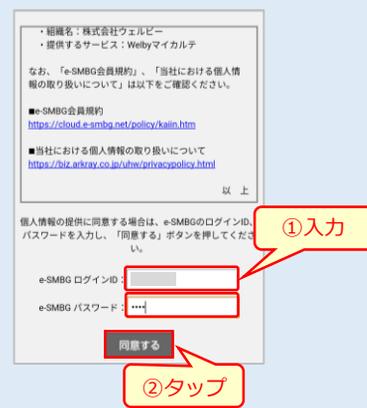

6 [e-SMBG アクセスコード] が表示されます。

7 [Welbyマイカルテ] に戻り、アクセスコードを入力し、[連携する] をタップします。以上で登録は完了です。




POINT 手順 **7** のアクセスコードの入力は、コピー＆ペーストがすると入力間違いがなくなりますので、大変便利です。初めての方はお試しください。

① 範囲長押しして選択したら [コピー] をタップ



【手順 **6** の [e-SMBG] 画面】

② アクセスコードの欄を長押ししてカーソルが表示されたら [貼り付け] をタップ

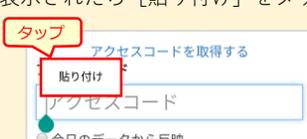

【手順 **7** の [Welbyマイカルテ] 画面】

【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welby.jp