



Android 版



マイカルテ

自己血糖測定器

【グルコカードプライム】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【グルコカードプライム】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血糖値」画面説明


1 『記録画面』

2 『一覧画面』

日付	曜日	項目	値
01/18	土	朝食前	107
		朝食後	123
		昼食前	101
		昼食後	121
		夕食前	102
		夕食後	100
		就寝前	100
		夜間	100
01/31	金	朝食前	100
		朝食後	100
		昼食前	100
		昼食後	100
		夕食前	100
		夕食後	100
		就寝前	100
		夜間	100

	食前	食後
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺	99.14	120.14
最高値	118.00	131.00
最小値	81.00	100.00
標準偏差	9.46	9.16
計測回数	27	27

3 『グラフ画面』

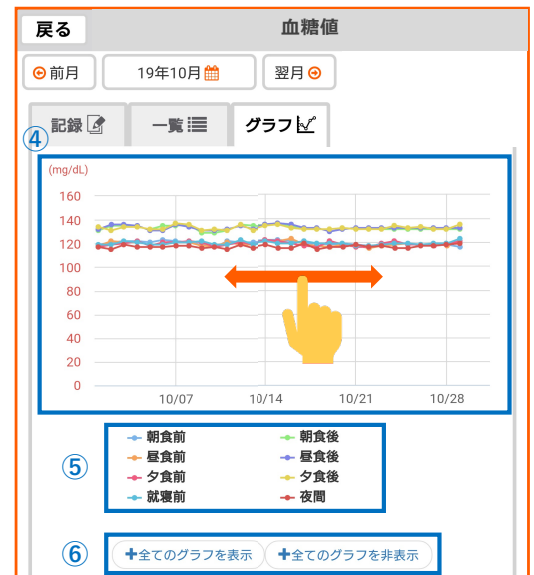

- ① 1日8回分の血糖測定データの入力が可能
- ② 入力データを一覧表示
- ③ 食前および食後の平均値、最高値、最小値、標準偏差、計測回数を表示
※食前：朝食前、昼食前、夕食前のデータを元に算出。
食後：朝食後、昼食後、夕食後のデータを元に算出。

- ④ 画面を左右にスクロールし、表示範囲の変更可能
- ⑤ 表示したい項目の選択が可能
- ⑥ 全グラフの表示/非表示切り替え

連携を行う前に確認していただきたいこと

【グルコカードプライム】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

- 「スマートフォン」の「Bluetooth」は「オン」になっていますか。
- 「スマートフォン」の「位置情報」は「オン」になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。かご契約会社へお問合せ下さい。
- インターネット通信が可能な環境でご利用ください。
- 「グルコカードプライム」の操作モードは「高機能」になっていますか。
- 「グルコカードプライム」の測定時間帯設定は「自動」になっていますか。
※「測定時間帯」が設定されていないとデータの連携ができません。
- 「グルコカードプライム」の通信設定は「自動」になっていますか。また、測定後自動送信が「オン」になっていますか。
詳しくはグルコカードプライムの取扱説明書をご確認ください。

【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

グルコカードプライムでの操作手順

1

グルコカードプライムの電源を長押しして設定画面を表示し、[機器設定]-[Bluetooth設定]-[デバイス登録]の順に開きます。



グルコカードプライムでの操作手順

2

リストの中から[未登録]となっている項目を選択し、[GT-7510のパスワード]が空欄の画面を表示します。



3

[Welbyマイカルテ]のタブバーにある[機器連携]をタップします。



【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

4

リストから[アークレイ血糖測定器 グルコカードプライム GT-7510]をタップします。



5

[ペアリング] 画面が表示されたら、[ペアリングを開始する] をタップします。



【グルコカードプライム】をはじめてご利用の方

6

[GT-7510(シリアルNo)をペアに設定しますか?]の画面が表示されたら、[ペア設定する]をタップします。



7

2 で表示した画面に血糖測定器のパスワードが表示されますので、表示されたパスワードを入力し [OK] をタップします。



8

[計測を開始してください]の表示が出たらペアリング完了です。

血糖測定器には[デバイスを登録しました]と表示されます。



【グルコカードプライム】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

【グルコカードプライム】のご利用にあたって ご留意いただきたいこと

- 連携操作をすると、血糖測定器本体に保存されているデータが全て取り込まれます（最大1100件）。『Welbyマイカルテ』に過去のデータが記録されている場合は上書きされます。計測データが複数ある場合は取得した期間と件数を表示します。データ取得後に表示されるまで時間がかかることがあります。

機器連携済みの方

1

[Welbyマイカルテ] のタブバーにある
[機器連携] をタップします。

タップ



2

リストから[アークレイ血糖測定器 グルコ
カードプライム GT-7510]をタップします。

タップ



3

[計測開始] 画面が表示されますので、
血糖測定を行ってください。

※このときスマートフォンの画面は、
[計測開始] 画面が表示されている状態である
ことを確認してください。



4

血糖測定が終了したらセンサーを抜き取っ
てください。[計測結果を受信中…]画面が
表示され、測定結果が反映されます。
[計測結果]画面の [登録する] をタップ
します。

※血糖測定器は自動で電源がOFFになります。



計測データが複数ある場合

計測データが
複数ある場合
は取得した期
間と件数を表
示します。

データ取得後
に表示される
まで時間がか
かることがあ
ります。



ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp

※掲載しているアプリ画面は
バージョン2.5.2です。