



ELECOM
LIFESTYLE m INNOVATION

welby マイカルテ

血圧計

【HCM-AS01】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【HCM-AS01】で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

① 朝1回目 08:00 血圧: 100 / 60 (mmHg) 脈拍: 66 (拍/分)
 ② 血圧: 100 / 68 (mmHg) 脈拍: 60 (拍/分)
 ③ エレコム
 ④ 手入力
 ⑤ 不規則脈波 (IHB) 発現

2019年11月22日(金)

測定時間	機器	測定値	状況
朝1回目 08:00	エレコム	100 / 60 (mmHg)	
朝2回目 11:30	手入力	100 / 68 (mmHg)	
夜1回目 13:12	エレコム	115 / 75 (mmHg)	
夜2回目 13:20	エレコム	123 / 81 (mmHg)	

2019年11月21日(木)

測定時間	機器	測定値	状況
朝1回目 08:00	手入力	100 / 65 (mmHg)	
朝2回目 11:30	手入力	100 / 68 (mmHg)	

『一覧画面』

① タイミング 時間

登録したデータは、測定時間によって【朝1回目】、【朝2回目】、
 【夜1回目】、【夜2回目】に自動で表示されます。
 (朝: 0時~11時59分、夜: 12時~23時59分)

② 血圧 : 収縮期血圧 (上) /拡張期血圧 (下) [mmHg]

③ 入力状況 (機器連携または手入力)

④ 脈拍 [拍/分]

⑤ 不規則脈波 (IHB) ※発現

機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり

機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし

— 検知できる機器を利用していないまたは入力なし

※不規則脈波 (IHB) :

血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。

血圧計をご利用中の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の有無をご確認下さい。

① 計測回数: 6
 ② IHB回数: 5

項目	収縮期	拡張期	脈拍
平均値	116.5	81.2	76.2
最高値	125	85	79
最低値	105	67	74
標準偏差	8.7	7.2	1.8

『サマリー画面』

① 計測回数 : 血圧を登録した回数を表示

② IHB回数 : IHBの記録回数を表示

連携を行う前に確認していただきたいこと

【HCM-AS01】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。

■スマートフォンの「Bluetooth」は「オン」になっていますか。

■スマートフォンの「位置情報」は「オン」になっていますか。

設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。

ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧いただくかご契約会社へお問合せ下さい。

■インターネット通信が可能な環境でご利用ください。

【HCM-AS01】をはじめてご利用の方

1

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。



2

リストから [エレコム血圧計 HCM-AS01] を
タップします。



3

[ペアリングモードにしてください] と
表示されたら [OK] をタップします。



【HCM-AS01】をはじめてご利用の方

4

[計測機器とペアリング] が表示されたら、
[ペアリングを開始] をタップします。



5

【HCM-AS01（血圧計）】の電源スイッチ
を「入」にし、血圧計の②測定／停止ボタン
を長押ししてください。



6

連携したいユーザー番号をタップしてください。




【HCM-AS01】をはじめてご利用の方

7

[計測を開始してください] が表示されたら、血圧測定を行います。


※連携したいユーザー番号を確認の上、計測を行ってください。

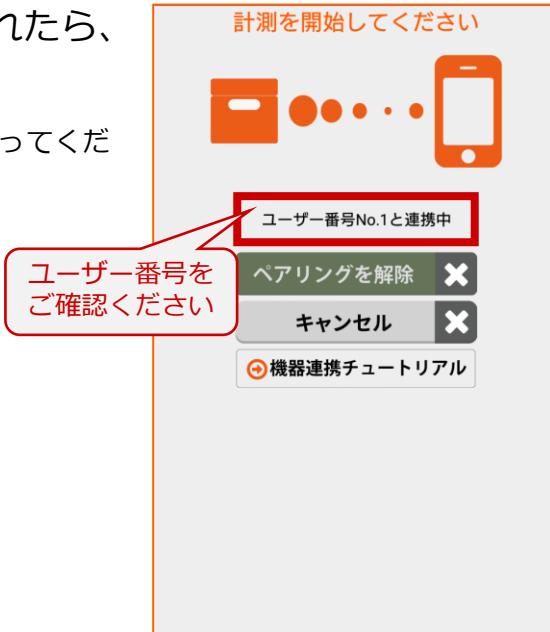

8

[測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。

※血圧計に保存されている計測データが1つの場合と複数ある場合で表示される画面が異なります。

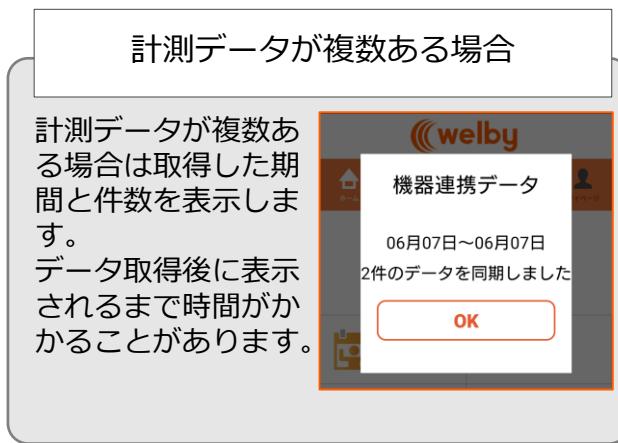

【HCM-AS01】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

【HCM-AS01】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

- 使い始めや使用中に電池残量が無くなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。
- 【HCM-AS01】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』または『ECLEAR plus』に一度取り込まれるとデータの取得ができなくなります。ご利用される際はご注意ください。
- 測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。

2回目以降の方

1

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。



2


リストから [エレコム血圧計 HCM-AS01] を
タップします。



3

[計測を開始してください] が表示されたら、
血圧測定を行います。

※連携したいユーザー番号を確認の上、計測を行ってください。

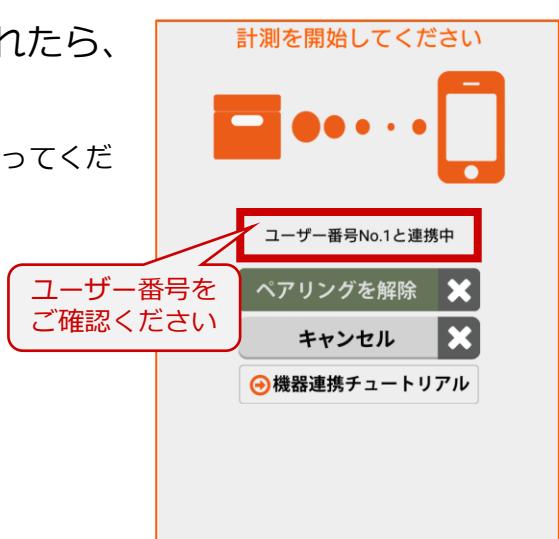


2回目以降の方

4

[測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。

※血圧計に保存されている計測データが1つの場合と複数ある場合で表示される画面が異なります。

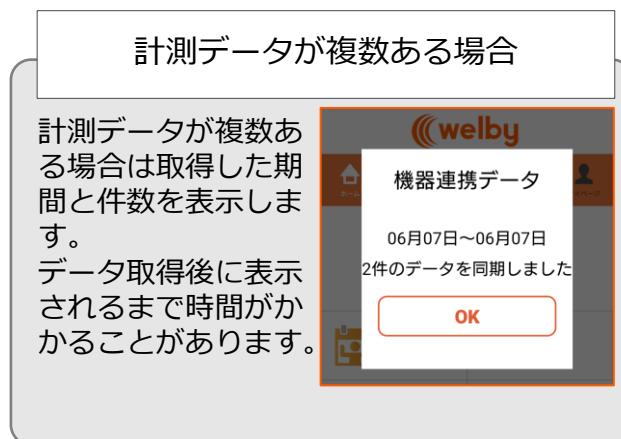

こんなときは

対処方法

「ペアリング失敗」と表示される	再度ペアリングをお試しください。
「計測失敗」と表示される	連携したいユーザー番号を確認の上、再度血圧の測定をしてください。
「データ送信失敗1」と表示される	アプリへの血圧値の送信時にエラーが発生しました。データ送信が失敗した場合、血圧値は血圧計に保存されます。次回の測定時に失敗分と合わせてアプリに送信されます。

ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp