



OMRON ((welby)) マイカルテ

【活動量計】かんたん連携

(対応機器：HJA-405T-W,HJA-405T-G,HJA-405T-WR,HJA-405T-BK)

Welbyマイカルテでは、【オムロンコネクト】と連携して活動量計で測定した結果を、スマートフォンでかんたんに取得することができます。

連携を行う前に確認していただきたいこと

- 「OMRON connect」アプリは「インストール済み」ですか。
活動量計から測定結果を連携するためにアプリが必要です。
- スマートフォンの「Bluetooth」は「オン」になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- スマートフォンの「位置情報」は「オン」になっていますか。
- インターネット通信が可能な環境でご利用ください。

活動量計のご利用にあたってご留意いただきたいこと

- 連携操作をすると、活動量計のデータと『Welbyマイカルテ』に取り込まれているデータの差分が取り込まれます。
- 過去30日分遡って記録が取り込まれ、他のアプリ等でデータが記録されている場合は、『オムロンコネクト』のデータに上書きされます。
- 2回目以降に連携操作をすると、活動量計のデータと『Welbyマイカルテ』に取り込まれているデータの差分が取り込まれます。

【活動量計】をはじめてご利用の方

1

[Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。



【活動量計】をはじめてご利用の方

2

リストから [オムロンコネク] をタップします。



3

リストからご利用中の機器をタップします。
(HJA-405Tを選択してください)

OMRON connectが立ち上がります。



OMRON connectでの操作手順

4

OMRON connectで連携機器の登録を行います。
連携画面の指示に従って、登録をしてください。



【活動量】をはじめてご利用の方

5

[測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。



⚠️ ご注意ください

- 取り込むデータがない状態では「計測データがありませんでした。」とメッセージが表示されます。本メッセージが表示された際は、次ページの手順で測定を行った上で再度Welbyマイカルテとのデータ連携をお試しください。

6

連携が完了すると、マイカルテの[機器連携]画面内[オムロンコネクト]の該当機器横に[連携]の表示がされますので確認してください。



【活動量計】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

機器連携済みの方

1

活動量計で測定します。
測定後、[Welbyマイカルテ]のタブバーにある[機器連携]をタップします。



2

[機器連携]リストから[オムロンコネク]をタップします。



3

リストからご利用中の機器をタップします。
(HJA-405Tを選択してください)



OMRON connectでの画面遷移

4

活動量計で測定したデータがOMRON connectと通信します。

機器

HJA-405Tと通信しています。



キャンセル

OMRON connectでの画面遷移

5

測定したデータが転送されると[転送完了！]と表示されますのでOKをタップします。

OMRON connectのホーム画面が表示されたら、スマートフォンの[戻る]ボタンをタップしてください。

機器

転送完了！



OK

タップ

6

[測定結果] が表示されますので [OK] をタップします。



ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp

※掲載しているマイカルテアプリ画面はバージョン2.8.0です