



【HealthPlanet】かんたん連携

TANITA

welby マイカルテ

iPhone版

Android版

タニタのアプリ「HealthPlanet」に記録されている測定結果を、かんたんに取得することができます。

◎ ◎ 連携を行う前に ◎ ◎

アプリ同士で連携を行いますので、次の3つの設定を確認してください。

※設定されていないと記録を正常に取得することができません。

■ タニタ「HealthPlanet」

・ アカウントは設定されていますか

記録を連携するために「HealthPalnet」アプリをダウンロードのうえ、アカウントの設定を行ってください。設定方法は、[HealthPalnet 使い方ガイド] をご確認ください。

([プロフィールアイコン] をタップし、 [このアプリの使い方] にて使い方ガイドが表示されます。)

・ タニタの測定器は登録されていますか

連携できる記録は、機器から連携した測定結果のみです。(※手入力した記録は連携できません。)

毎日の記録は、体重計等と「HealthPalnet」の連携をして行ってください。

■ 「スマートフォン」

・ Bluetoothの設定はオンになっていますか

タニタの測定器から「HealthPalnet」へデータを送信するために必要です。

設定方法はお使いの機種によって異なります。ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。ご契約会社へお問合せください。

◆ タニタの体組成計「RD-900」で測定した場合の手順です。

◆ アプリの画面はiPhone(iOS版バージョン1.2)で操作した場合の画面です。Android端末の場合でも同じ画面が表示されます。

◆ 「HealthPalnet」へ手入力したデータの取得はできません。

◆ 取得したデータが自動反映されるまでに時間が掛かります。

Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [マイページ] をタップし、 [機器、サービス連携] をタップします。

2 [タニタヘルスプラネット] の [連携登録] をタップします。



3 [機器連携設定] 画面が表示されたら、 [タニタID] と [パスワード] を入力し、 [連携する] をタップします。以上で登録は完了です。




アプリで記録を確認
しましょう！

裏面へ進む → →

Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- 1 アプリのホーム画面で、[体重]をタップします。
- 2 連携したデータが確認できます。

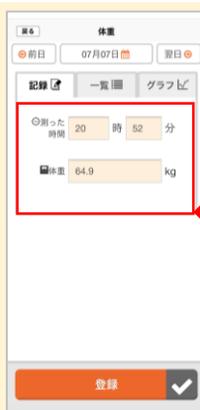

【[HealthPalnet] の記録画面】



入力したデータは、一覧やグラフでかんたんに振り返ることができます。

月日	曜日	時間	体重
07/01	金	08:00	62.50
07/02	土	10:00	62.80
07/03	日		
07/04	月	08:10	63.80
07/05	火	08:00	63.80
07/06	水	08:00	64.10
07/07	木	20:06	64.90
07/08	金	09:45	63.70
07/09	土	08:00	63.60
07/10	日	10:00	64.10
07/11	月	08:00	64.00
07/12	火	08:00	62.90
07/13	水	08:28	63.90
07/14	木	09:45	63.70
07/15	金	08:40	64.20
07/16	土	08:30	63.90



【お問い合わせ】
Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
電話 : 0120-095-655
メール : support@welby.jp