



【体組成計】かんたん連携

テルモ体組成計で測定した結果を、NFC通信機能（Felica®等）搭載のスマートフォンでかんたんに取得することができます。

（対応機種：WT-B100DZ）

⚠️ ご注意ください 結果は測定時のみ記録されます。（過去の測定値は連携できません。）

Step.1 測定結果をアプリに取得しましょう

- 1 [Welbyマイカルテ] のタブバーにある [機器連携] をタップします。
- 2 リストから [テルモ体組成計] をタップします。
- 3 [計測を行ってください。] と表示されます。



- 4 アプリの画面表示はそのままで、体重計を行います。
- 5 測定が終了したら、体重計にスマートフォンをかざして、データを取得します。
- 6 [機器連携データ] が表示されたら、[OK] をタップします。以上で登録は完了です。



Step.2 アプリで記録を確認しましょう

- 1 アプリのホーム画面で、[体重] をタップします。
- 2 連携したデータが確認できます。



入力したデータは、一覧やグラフで、かんたんに振り返ることができます。



【お問い合わせ】
 Welby (ウェルビー) カスタマーサポート
 電話 : 0120-095-655
 メール : support@welby.jp